

TN - Brush

A 제품명

- 제품명: **TN-Brush**
- 품목명: 치과연마용브러쉬
- 품목분류번호: A55050.02
- 형명: **TN-1.3A, TN-1.0A, TN-0.8A**

B 제품설명

본 제품은 브러쉬, 미니 파이프, 스탠더드 덴탈 커플링으로 구성되어 있고, 핸드피스에 체결하여 사용하며, 회전운동을 이용하여 임플란트 주위염 또는 치아의 플라그와 과사조직을 제거하는데 사용합니다

C 사용목적

회전운동을 이용하여 청소하는 브러쉬

D 일반적인 주의사항

본 제품은 비멸균 상태로 제공되므로 사용 전 반드시 **고압 증기 멸균 후 사용**해야 합니다. 사용자는 수술 전에 제품의 기능적인 문제가 없음을 확인해야 합니다.

E 취급 시 주의사항

본 제품은 **일회용**으로 사용합니다. 동일 환자에게만 사용하며 재사용은 제품이 손상되거나 제품의 오염에 의하여 환자의 감염이나 교차 감염을 일으킬 수 있습니다.

F 사용 전 준비사항

- 제품에 파손된 곳은 없는지 확인하십시오.
- 핸드피스가 정상작동하는지 확인하십시오.
- 비멸균 제품이므로 사용 전에 반드시 고압증기 멸균 후 사용하십시오.

G 사용방법 및 조작순서

- 포장을 개봉하여 브러쉬를 꺼냅니다.
- 고압증기 멸균용 파우치에 브러쉬를 넣고 121℃에서 30분간 멸균합니다.
- 브러쉬를 핸드피스에 장착합니다.
- 장착 후 이상 유무를 확인합니다.
- 시술 부위에 주수하면서 사용합니다.
- 시술이 끝나면 핸드피스와 분리한 후 폐기합니다.

H 사용 rpm

500 ~ 800 rpm

I 사용 후 폐기

본 제품은 **일회용 의료기기**이므로, 사용 후 반드시 폐기하여 주십시오.

J 보관방법

직사광선을 피하고 고온/다습하지 않은 실온에서 보관

MS-P1300(Rev.5,2312)

“부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)”

Dentium

판매원 **Dentium Co., Ltd.**
경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 76, 1층 B102호 (이의동, 덴티움지식산업센터)
Tel. 070-7098-0336 Fax. 031-8019-9133 www.dentium.co.kr

제조원 **GENOSS Co., Ltd.**
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기 R&DB 센터 1층 일부
경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 76 덴티움지식산업센터 13층 일부
Tel. 031-888-5100 www.genoss.com